

GHID DE UTILIZARE

5 pași de parcurs pentru a utiliza Tensi+

tensi+

UTILIZARE TENSI+



PREGĂTIRE

Puneți câte o picătură de gel pe fiecare electrod. Gelul conductiv îmbunătățește contactul dintre electrozi și piele.



POZIȚIONARE

Așezați Tensi+ peste gleznă. Electrocul inferior ar trebui să fie plasat chiar sub și în spatele gleznei interioare.



PORNIREA DISPOZITIVULUI

Apăsați și țineți apăsat butonul Pornit/Oprit  LED-urile se aprind și veți auzi un sunet moale, lung.



REGLAREA INTENSITĂȚII STIMULĂRII

Creșteți treptat intensitatea tratamentului ținând apăsat butonul (+), până când simțiți o ușoară furnicătură în talpă. Dacă furnicăturile sunt inconfortabile, scădeți intensitatea ținând apăsat butonul (-).



TRATAMENT ȘI OPRIRE AUTOMATĂ

Tratamentul Tensi+ este acum pornit. Butoanele dispozitivului se vor bloca după 30 de secunde de inactivitate. Pentru deblocare apăsați butonul (-). După 20 de minute, dispozitivul se va opri automat. Dacă doriți să opriți dispozitivul manual, țineți apăsat butonul Pornit/Oprit. 



VIDEOCLIPURI




Dacă aveți îndoieli, urmăriți unul dintre videoclipuri utile pe site-ul nostru: tensiplus.ro

Atenționare :

Citiți toate indicațiile și contraindicațiile detaliate în instrucțiunile din ambalaj înainte de utilizare.

TENSI+

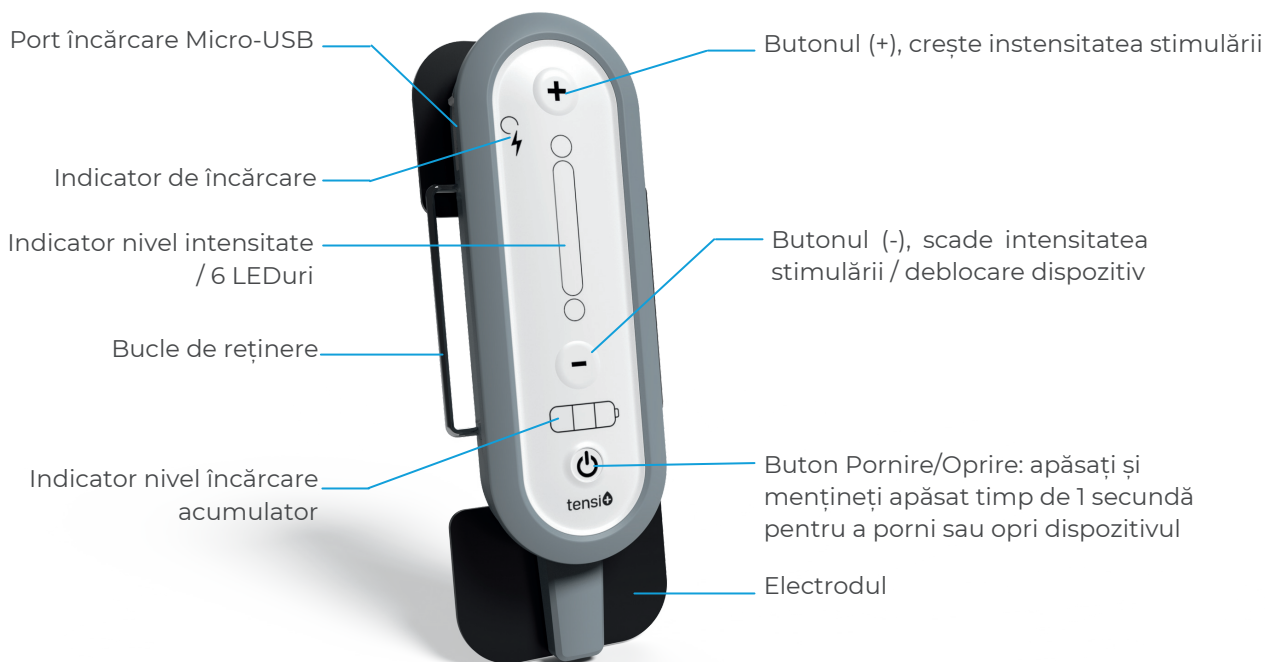

REGLAREA INTENSITĂȚII DE STIMULARE

Simt o ușoară furnicătură dedesubtul piciorului.



**POZIȚIA ȘI CONTACTUL
SUNT BUNE**

Reduceți ușor intensitatea cu (-) apăsând pe buton. Când nu mai simțiți furnicăturile, ați atins nivelul de confort.

Nu simt nici o furnicătură sub piciorul meu.



VERIFICAȚI DISPOZITIVUL

Asigurați-vă că există suficient gel pe fiecare electrod și/sau reglați poziția dispozitivului pe gleznă. Uneori utilizatorii nu simt nici o furnicătură. Acest lucru nu înseamnă neapărat că tratamentul nu va funcționa. Dacă acest lucru se întâmplă, luați legătură cu medicul care v-a recomandat Tensi+.

Tensi+ începe să clipească în timpul tratamentului.



TENSI+ ESTE DECONECTAT

Tensi+ s-a deconectat de pielea ta pentru mai mult de o secundă. Mutați dispozitivul ușor pentru a-ți găsi nervul tibial și asigură-te că există suficient gel pe fiecare electrod pentru o bună conductivitate.

Nu pot crește nivelul de intensitate al LED-urilor.



TENSIUNEA MAXIMĂ ATINSĂ

Dacă dispozitivul dvs. Tensi+ rămâne la 3, 4 sau mai multe LED-uri, asta înseamnă că a atins maximul intensitate de 50 mA pe baza rezistenței pielii Dvs. Pielea ta are capacitatea de a obstrucționa fluxul de curent electric. Dispozitivul va atinge o intensitate mai mare atunci când pielea conduce mai multă electricitate. Dispozitivul va rămâne la o intensitate mai mică când pielea conduce mai puțină electricitate.

VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU PENTRU SFATURI ȘI
VIDEOCLIPURI UTILE

www.tensiplus.ro



20 bis rue Barthélemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
Franța